

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania Masażerów

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1. Ryzyko mechanicznych urazów i przeciężenia mięśni

- Nie używaj masażera na obszarach ciała z otwartymi ranami, obrzękami, stanami zapalnymi ani w miejscach z niedawnymi urazami.
- Nie stosuj masażera na kościach, kręgosłupie lub w innych miejscach, gdzie może wywołać dyskomfort.
- Unikaj nadmiernego nacisku podczas użytkowania, aby zapobiec przeciężeniu mięśni lub uszkodzeniu tkanek.

2. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym

- Nie używaj urządzenia w pobliżu wody ani w wilgotnym środowisku, chyba że jest to wyraźnie dozwolone przez producenta.
- Zawsze odłącz masażer od źródła zasilania przed czyszczeniem, konserwacją lub wymianą elementów.
- Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów i zasilaczy dostarczonych przez producenta.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami podczas jego użytkowania lub podłączania do zasilania.

3. Ryzyko przegrzania i oparzeń

- Nie używaj masażera dłużej, niż zaleca producent w instrukcji obsługi.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Unikaj stosowania masażerów termicznych na jednej części ciała przez dłuższy czas, aby zapobiec przegrzaniu skóry.
- Jeśli urządzenie nagrzewa się nadmiernie, natychmiast przerwij użytkowanie i skontaktuj się z serwisem.

4. Zagrożenia związane z użytkowaniem przez osoby z ograniczeniami zdrowotnymi

- Nie używaj masażera, jeśli masz wszczepiony rozrusznik serca, metalowe implanty lub inne urządzenia medyczne bez konsultacji z lekarzem.
- Osoby z zaburzeniami układu krążenia, chorobami serca lub nadciśnieniem powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem urządzenia.
- Nie stosuj masażera w miejscach, gdzie skóra jest nadmiernie wrażliwa lub występują reakcje alergiczne.

5. Zagrożenia dla dzieci i zwierząt domowych

- Przechowuj masażer poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
- Nie pozwalaj dzieciom na korzystanie z urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.

6. Zagrożenia związane z użytkowaniem w specyficznych warunkach

- Unikaj używania masażera w ekstremalnych temperaturach lub w miejscach o wysokiej wilgotności, chyba że producent wskazuje, że urządzenie jest do tego przystosowane.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie bezpośredniego światła słonecznego ani przechowuj w pobliżu źródeł ciepła.

7. Zagrożenia związane z konserwacją i czyszczeniem

- Czyszczenie masażera powinno być wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta, przy użyciu miękkiej, lekko wilgotnej szmatki.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie używaj agresywnych środków czyszczących.
- Regularnie sprawdzaj stan urządzenia i kabla zasilającego pod kątem uszkodzeń. W przypadku ich wystąpienia zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.

Wszelkie szczegółowe ostrzeżenia lub informacje na temat bezpieczeństwa produktu są dostępne w instrukcji obsługi dołączonej do produktu lub dostępnej w formacie pdf. w karcie produktu lub na stronie www.producenta/dostawcy.