

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

## **Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania LAKTATORÓW**

### **Ogólne zagrożenia i środki ostrożności**

#### **1. Ogólne środki bezpieczeństwa**

- Zawsze przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i postępuj zgodnie z zaleceniami producenta.
- Upewnij się, że laktator jest przeznaczony do indywidualnego użytku – stosowanie wspólnych urządzeń może prowadzić do ryzyka infekcji.
- Przed każdym użyciem dokładnie umyj wszystkie elementy mające kontakt z mlekiem, aby zapobiec rozwojowi bakterii.

#### **2. Zagrożenia mechaniczne**

- Regularnie sprawdzaj stan urządzenia, w tym rurki, uszczelki i nasadki – uszkodzone elementy mogą powodować urazy lub nieprawidłowe działanie.
- Nie używaj laktatora z widocznymi pęknięciami lub innymi uszkodzeniami.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas montażu lub użytkowania urządzenia, aby zapobiec złamaniom lub skaleczeniom.

#### **3. Zagrożenia elektryczne**

- W przypadku elektrycznych laktatorów zawsze używaj oryginalnego zasilacza i przewodu.
- Nie używaj urządzenia w wilgotnym środowisku, np. w pobliżu wody, aby zapobiec ryzyku porażenia prądem.
- Odłącz urządzenie od zasilania po zakończeniu użytkowania i przed rozpoczęciem konserwacji.

#### **4. Zagrożenia termiczne**

- Nie podgrzewaj elementów laktatora w kuchence mikrofalowej – może to prowadzić do deformacji materiałów i ryzyka poparzenia.

- Przed użyciem sprawdzaj temperaturę części mających kontakt ze skórą, szczególnie po ich sterylizacji.

## **5. Środki ostrożności związane z użytkowaniem w specyficznych warunkach**

- Nie używaj laktatora w ekstremalnych warunkach, takich jak wysokie temperatury lub wilgotność, które mogą wpłynąć na wydajność urządzenia.
- W przypadku transportu upewnij się, że wszystkie elementy są odpowiednio zabezpieczone, aby zapobiec ich uszkodzeniu.

## **6. Konserwacja i higiena**

- Regularnie myj wszystkie części urządzenia w ciepłej wodzie z delikatnym środkiem myjącym lub sterylizuj je zgodnie z instrukcją producenta.
- Po każdym użyciu wylewaj mleko pozostałe w rurkach lub pojemniku, aby zapobiec zanieczyszczeniu.
- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym miejscu, aby uniknąć gromadzenia się kurzu i zanieczyszczeń.

## **7. Ostrzeżenia dotyczące użytkowników**

- Osoby starsze lub z ograniczoną sprawnością ruchową powinny stosować urządzenie pod nadzorem lub z pomocą, jeśli to konieczne.
- W przypadku dyskomfortu, bólu lub innych nieprawidłowości podczas użytkowania natychmiast zaprzestań korzystania z laktatora i skonsultuj się z lekarzem lub doradcą laktacyjnym.

## **Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń**

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.

Wszelkie szczegółowe ostrzeżenia lub informacje na temat bezpieczeństwa produktu są dostępne w instrukcji obsługi dołączonej do produktu lub dostępnej w formacie pdf. w karcie produktu lub na stronie [www.producenta/dostawcy](http://www.producenta/dostawcy).